

IDAL® - intradermal impfen

Wertvolle Tipps für ein optimales Anwendungsergebnis







Vorbereitung

IDAL®-Gerät vor Aufsetzen der Impfstoffflasche mit Spülflüssigkeit (1) (Rinsing fluid) durchspülen (ca. 10 - 15 Sprühstöße). (1)
 Vor dem Aufsetzen Impfstoffflasche erwärmen (mind. 20 - 30° C) und gut schütteln. (2)
WICHTIG: Durch Schütteln entstandene Luftblasen mit leichtem Klopfen an die Flaschenwand beseitigen.
EMPFEHLUNG (3): Vor Aufsetzen der Impfstoffflasche den Gummistopfen mit einer sterilen Nadel durchstechen, um Überdruck auszugleichen.



Aufsetzen der Impfstoffflasche

IDAL®-Gerät über Kopf halten und den Spike mittig in den Gummistopfen des Flaschendeckels stoßen.

EMPFEHLUNG: Achten Sie bei der Nutzung des IDAL®-Twins darauf, dass die beiden aufgesetzten Flaschen die gleiche Größe haben (nicht 50 Ds mit 100 Ds kombinieren)



Während des Impfens

Vermeiden Sie schnelle und hektische Bewegungen in unterschiedlichen Winkeln und achten Sie beim Aufziehen des Impfstoffes darauf, dass der kleine Kreis des Positionssensors immer im großen Kreis steht. (4)



Applikation am Tier

Achten Sie darauf, dass die Nase des Impfgerätes vollständig auf der Haut des Tieres aufliegt. Schräges Impfen oder Abrutschen bei der Impfung kann das Impfergebnis negativ beeinflussen.

HINWEIS: geringe Impfstoffreste sind nach der Impfung auf der Haut des Tieres zu sehen. Dies vermindert nicht die Wirksamkeit des Impfschutzes für das Tier.

Impfstoffflaschenwechsel

Achten Sie darauf, dass die zu wechselnde Impfstoffflasche nicht vollkommen entleert wird. Ein kleiner Rest sollte in der Flasche verbleiben, damit keine Luft in das System gezogen wird und die Impfstoffzufuhr im Gerät nicht unterbrochen wird. Dadurch wird das Gerät geschont und der Impfstoffrest, der in der leeren Flasche verbleibt, minimiert. Dieser Impfstoff kann mit der Einmalspritze in eine andere Flasche überführt werden, damit er nicht verloren geht.

EMPFEHLUNG: Nach dem Flaschenwechsel sollte unmittelbar weitergeimpft werden. Wenn Sie eine Pause machen, setzen Sie die neue Flasche erst unmittelbar vor dem Weiterimpfen auf.



Gerätereinigung nach dem Impfen

Setzen Sie die Spülflüssigkeit (Rinsing fluid) auf das IDAL®-Gerät und spülen Sie das System mit 10-15 Sprühstößen. Anschließend reinigen Sie die den Impfkopf unter fließendem Wasser, wischen das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und lagern es im mitgelieferten Koffer. So haben Sie lange Freude an Ihrem IDAL®-Gerät.

Unsere Experten für intradermales Impfen und das gesamte Impfprogramm von MSD Tiergesundheit sind für Sie da:



Region Nordwest
 B.sc.agr. Sebastian Kleiner
 Farm Device Sales Manager
 sebastian.kleiner@msd.de
 +49 (160) 896 88 10



Region Nord/West
 Dr. Christine Renken
 Technical Managerin
 christine.renken@msd.de
 +49 (173) 7038012



Region Mitte, Süd/Ost
 Dr. Robert Tabeling
 Technical Manager
 robert.tabeling@msd.de
 +49 (172) 8347531



Region Süd/ Südwest
 Dr. Johanna Vogels
 Technical Managerin
 johanna.vogels@msd.de
 +49 (173) 2606865



Region Nord/Ost
 Dr. Friederike von und zur Muehlen
 Technical Managerin
 friederike.muehlen@msd.de
 +49 (174) 1740102



Die richtige Bedienung des IDAL®-Gerätes können Sie sich auch in diesem kurzen Video noch einmal anschauen:

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
 Intervet Deutschland GmbH - ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit

Intervet Deutschland GmbH • Feldstraße 1a • D-85716 Unterschleißheim • www.msd-tiergesundheit.de

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

MEHR. WERT.
 PRÄVENTION.



150843-DE-Sep24(100)-DE-IDA-191000001